


Hướng dẫn Tham khảo Nhanh Tự Sử dụng Gạc Quệt Mũi

- Một chuyên viên y tế sẽ xác minh danh tính và đăng ký trước của từng người.
- Trong khi duy trì khoảng cách phù hợp sáu feet trở lên để giảm phơi nhiễm với virus, một chuyên viên y tế sẽ đặt một bộ gạc quệt tự sử dụng có dán nhãn trước trên một bàn gần đó.
- Xét nghiệm có thể được tự thực hiện dễ dàng. Trong phạm vi khoảng cách an toàn, một chuyên viên y tế sẽ giới thiệu ngắn gọn về xét nghiệm và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Sử dụng Mã QR hoặc truy cập:

<https://youtu.be/vsQVxsQY3jc>

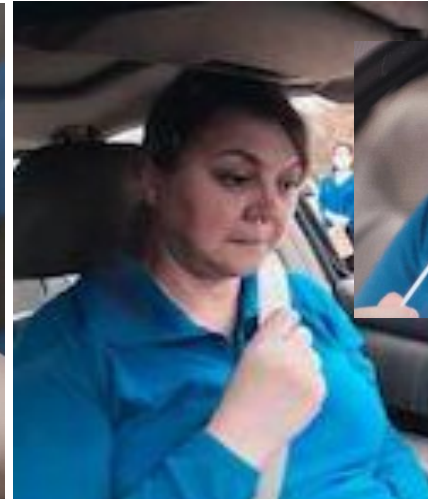

1

Mở bao gói ngoài của gạc quệt. Chỉ cầm vào đầu bằng nhựa. Cần thận để tránh chạm vào đầu mềm.

2

Đặt đầu mềm của gạc quệt **vào khoảng giữa trong mũi**, xoay hai lần, và, giữ nó ở bên trong trong vòng 15 giây.

3

Lặp lại thao tác ở lỗ mũi còn lại.

4

Mở ống và đặt đầu mềm của gạc quệt xuống dưới, vào trong ống.

5

Bỏ phần trên của que gạc quệt và đậy nắp ống lại.

6

Khi xong, đặt lại bộ xét nghiệm, bao gói và phần đầu bị gãy của gạc quệt lên bàn.



*Do hạn chế nguồn cung tại thời điểm soạn hướng dẫn tham khảo nhanh này, một gạc quệt vòm mũi họng được sử dụng trong hình. Tuy nhiên, gạc quệt sử dụng cho việc xét nghiệm tự quệt là dạng gạc quệt mũi xóp dùng để đưa vào bên trong mũi.



FEMA