




ハイケア インヘラー
取扱説明書

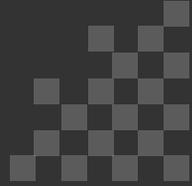

HYCARE JAPAN


1. 各部の名称

1. 各部の名称

各部の名称は以下の通りです。



インヘラー

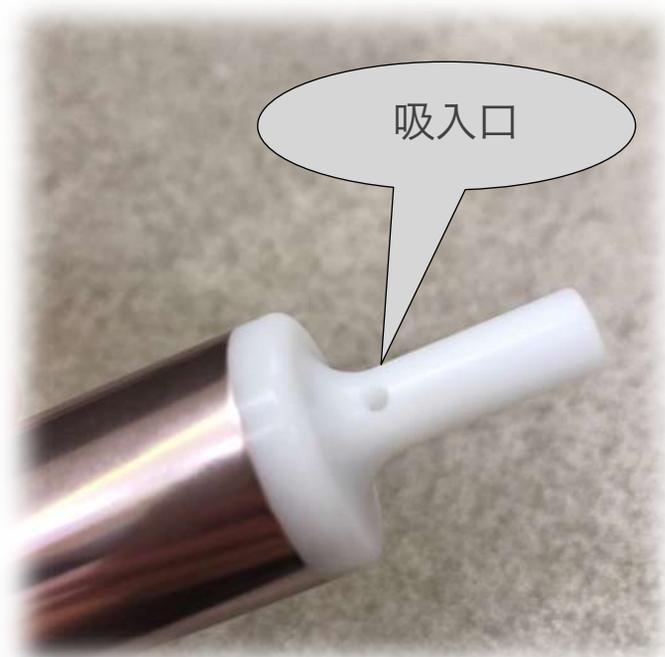

2. 利用方法

2-1. 機器を取り扱う前に

- 1) 機器の周囲に火器や熱源が無いことを必ず確認してください。

※暖房機等の温風が直接当たらないことや、電子機器などからの余熱の影響が無いことも確認してください。



- 2) 任意の方法で体の静電気を除去してください。

※効果の立証された静電気除去リストバンド等を事前に身に付けておくことを推奨致します。

- 3) 水素検知器（防爆、防水仕様、10,000ppmスケール推奨）の電源を入れ、水素供給源（HYCAREPOD100、HYCARE LMなど）の直上近傍に設置し、水素の漏洩が無いことを確認、監視してください。



2-2. 水素吸入開始

- 1) 吐出部のキャップを取り外してください。

- 2) ハイケアポッド10L等、水素供給源を準備、圧力を確認し、残量が十分であることを確認してください。

- 3) インヘラーのオスアダプターをハイケアポッドのメスアダプターにしっかり差し込んでください。奥まで差し込むとロックされ外れなくなります。



- 4) 差し込むと同時に、吐出口から水素の放出が始まりますので、吐出口を速やかに口に含み、水素吸入を開始してください。

- 5) 吸入時は、“ゆっくり口から吸い込み、鼻から息を吐く“、を繰り返してください。

- 6) 水素放出に伴い、ハイケアポッド本体が冷たくなります。冷たくなりすぎると、水素の放出が弱まりますので、ハイケアポッド本体を握り、手で温めながら吸入を行ってください。

2. 利用方法

7) 吸入中、インヘラーの吸入口を指などで塞がないよう注意してください。




この穴を塞がない



吸入口を塞ぐと、外気を取り込めなくなるため、吸入できなくなります。

2-3. 水素吸入終了

1) 吸入が終了したら、ハイケアポッドのメスアダプターをハイケアポッド側に引っ張り、ロックを解除し、インヘラーを取り外してください。

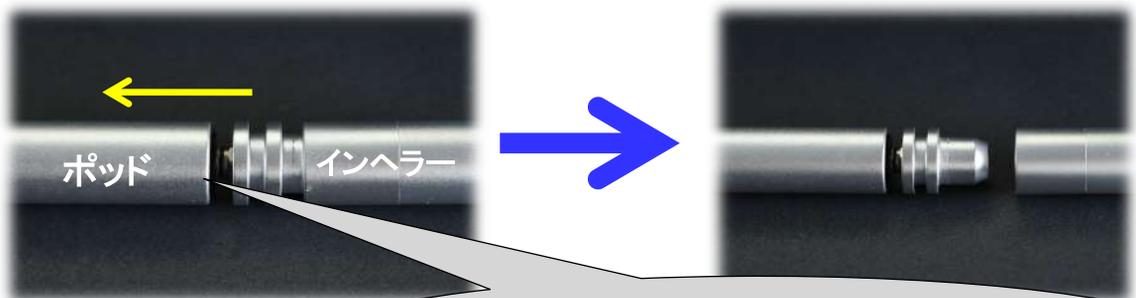

メスアダプターを矢印方向に引っ張る



インヘラーを取り外さない限り、水素は吐出し続けますので、吸入が終了したら、速やかにインヘラーを取り外してください。

2) 吐出口を清潔に保つため、ティッシュ等でよく拭き取った後、キャップを取り付けてください。

★充填時期の目安として、吸入の連続使用時間 約100分（1分間の吸入なら約100回）です。

3. 使用上の注意事項

■本機は、HYCARE製のHYCAREPOD及びHYCAREシリーズ専用のツールとなります。それ以外の機器や、所定の用途以外でのご使用は、事故を誘発する恐れがありますので、絶対に行わないでください。またHYCAREPODの取説を熟読してから取り扱いを開始してください。

■HYCARE灯社製のHYCAREPOD及びHYCAREシリーズを使用して**水素吸入を行う場合、必ず本機を使用してください。**

■本機の**設定流量はあくまで目安**となります。環境温度や水素残量、吸入時間により流量が変化しますが、故障ではありませんのでご周知ください。特に基本設定より大きい流量を設定した場合、吸入時間と共に流量が低下いたします。この場合、HYCAREPODが非常に冷たくなりますので、本機を外し、しばらく放置し、圧力を回復させてから再度吸入を行ってください。

■大容量のHYCAREPODを使用する場合、本機とHYCAREPODの間に、延長アダプター（別売）を接続して吸入を行ってください。

■カニューレ、マスク等を使用する場合、本機の吸入口をテープ等で塞ぎ、変換アダプター（別売）を使用して接続してください。

■本機は水素ガスを活用する機器となります。

水素ガスの危険性を熟知した上でご使用ください。

■許可なく本機を分解しないでください。所定の機能が発揮されない場合は、速やかに使用を止め、販売店にご相談ください。

■本機は医療機器ではありません。医療行為には絶対使用しないでください。

■乳幼児の手の届くところに本製品を置かないで下さい。お子様がご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。



<保証とアフターサービスについて>

●保証は本製品を購入された方のみ適用されます。保証期間はご購入日から1年間です。

<無料修理規定>

●保証期間内にマニュアル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理いたします。

●保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。

②ご購入後の輸送、移動、落下等による故障及び破損。

③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や取扱不備による故障及び破損。

④本書の指示が無い使い方による破損の場合。

⑤本書にお買い上げ年付日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。